

INSTRUCTIES VOOR HET VERZAMELEN EN VERZENDKLAARMAKEN VAN DE DARMTHERAPIESCREENING (PLUS)


Analytic



Lees eerst de instructies helemaal door voordat u aan de afname van het monster begint!
Bij vragen: neem eerst contact op met uw behandelaar!

De testkit bestaat uit:

- Handleiding voor monsterafname
- 2 x Fecesbuis (bruine dop)
- 1x TFT-kit (3 grote fecesbuizen, waarvan DAG 1 en DAG 3 met vloeistof, in een blister)
- 1x Histaminebuis (groen/blauwe dop met vloeistof)
- Etiket voor histaminebuis
- 3 x Ontlastingopvanger
- 2 x RigidSafetyBag®
- Safetybag

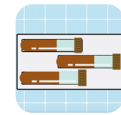

Daarnaast heeft u een retourenvelop en aanvraagformulier van RP Analytic ontvangen.

Is uw pakket niet compleet? Neem dan telefonisch contact op via +31(0)113-370170 (ma-vr 8:30-17:00 uur).

Vorbereiding:

1. Vul uw naam en geboortedatum in op het etiket op de fecesbuizen.
2. Vul uw naam en geboortedatum in op het etiket op de histaminebuis en plak deze op de histaminebuis.
3. Controleer of uw gegevens correct zijn ingevuld op het aanvraagformulier.
4. Controleer of er vloeistof in buis 1 en 3 van de TFT-kit zit. Is dit niet het geval? Neem dan eerst contact met ons op via het bovenstaand nummer.
5. Bekijk de volgende 3 instructiefilms via de volgende YouTube links:



TFT <https://www.youtube.com/watch?v=wMJL2WukNm8>

Histamine <https://www.youtube.com/watch?v=VqDQ6vitf4o>

Feces <https://www.youtube.com/watch?v=BTYQaPxosm0&t=88s>

Of kijk op onze website: www.rpsanitashumanus.com/diensten/rp-analytic/instructiefilms

Belangrijk!

- De TFT-test moet op **drie achtereenvolgende dagen** worden afgenomen. Darmparasieten worden onregelmatig uitgescheiden, daarom is het belangrijk om op drie verschillende dagen ontlasting af te nemen.
- De **feces- en histaminebuis** moeten samen met de **TFT-test op DAG 3** worden afgenomen.
- De **fixatievloeistof in de TFT-kit** (buis 1 en 3) is nodig om de zogeheten 'vegetatieve stadia' van de darmparasieten te kunnen aantonen. Na de stoelgang op DAG 1 en DAG 3 moet de ontlasting direct in de fecesbuizen worden gedaan, omdat sommige stadia van de darmparasieten na 30 minuten buiten het lichaam niet meer detecteerbaar zijn.
- Indien u meerdere malen per dag ontlasting produceert, dient u toch slechts **eenmaal per dag een container** te vullen. Indien u geen dagelijkse stoelgang heeft, wacht u totdat u alle drie de containers heeft kunnen vullen. **De langere tijd tussen de monsterafnames is niet van invloed op het onderzoek.**







- Mocht u geen ontlastingopvanger hebben, dan valt de ontlasting bij zgn. doorspoeltoiletten vaak direct in het water. Dit maakt het verzamelen lastig en kan de betrouwbaarheid van het onderzoek verminderen. Door vóór de stoelgang enkele langere stukken dubbelgevouwen toiletpapier op het wateroppervlak te leggen, wordt dit min of meer afgedekt. De ontlasting kan dan vanaf het papier worden verzameld.
- **De gebruikte fixatievloeistof (SAF) heeft een geringe toxiciteit** voor volwassenen. Huidcontact is, indien dit direct met water wordt afgespoeld, niet schadelijk. Deze waarschuwing dient met name om te voorkomen dat kinderen de vloeistof drinken.

Afname van het monster DAG 1



TFT-kit

1. Bevestig de ontlastingopvanger om de toiletbril en vang uw ontlasting daarmee op.
2. Neem TFT-buis 1 met vloeistof uit de blister en vul de buis met ontlasting.
Let op: De ontlasting en vloeistof samen mogen niet boven de rode streep uitkomen. Zorg dat de ontlasting volledig wordt omhuld door de vloeistof.
3. Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis en schud de buis rustig (ca. 20 seconden).
4. Noteer de afnamedatum op de buis.
5. Bewaar de buis in de blister in de koelkast.

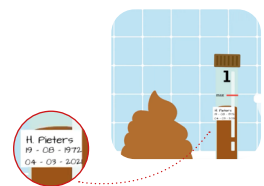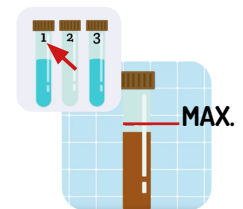

Afname van het monster DAG 2



1. Bevestig de ontlastingopvanger om de toiletbril en vang uw ontlasting daarmee op.
2. Neem TFT-buis 2 zonder vloeistof uit de blister en vul de buis voor de helft met ontlasting.
NB: Neem van tenminste 6 verschillende plaatsen een scheepje ontlasting!
3. Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis.
4. Noteer de afnamedatum op de buis.
5. Bewaar de buis in de blister in de koelkast.

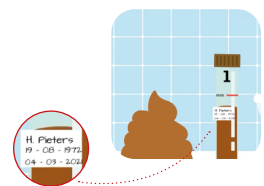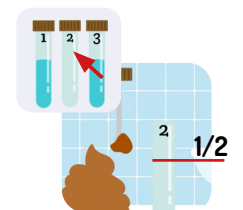

Afname van het monster DAG 3


Vervolg TFT-kit

1. Bevestig de ontlastingopvangner om de toiletbril en vang uw ontlasting daarmee op.
2. Neem TFT-buis 3 met vloeistof uit de blister en vul de buis met ontlasting.
Let op: De ontlasting en vloeistof samen mogen niet boven de rode streep uitkomen. Zorg dat de ontlasting volledig wordt omhuld door de vloeistof.
3. Draai na het vullen de dop recht en stevig op de buis en schud de buis rustig (ca. 20 seconden).
4. Noteer de afnamedatum op de buis.
5. Doe de derde TFT-buis in de blister en stop de blister in de SafetyBag.
6. Verwijder de witte folie van de SafetyBag. Druk de vrijgekomen plakstrip aan zodat het zakje goed is afgesloten.

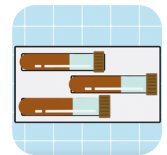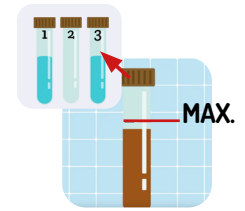


Fecesbuizen

7. Vul de twee fecesbuizen minimaal voor de helft met ontlasting.
NB: Neem van tenminste 6 verschillende plaatsen een scheepje ontlasting.
8. Schroef de fecesbuizen dicht en stop deze in de RigidSafetyBag® in het harde plastic hoesje. Druk de vrijgekomen plakstrip aan zodat het zakje goed is afgesloten.
- De RigidSafetyBag® bevat absorberend materiaal dat de buizen beschermt tijdens transport.

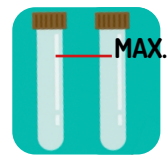


Histaminebuis

9. Neem het buisje met groen/blauwe dop. Draai de **groene dop (met het kammetje)** een kwartslag linksom en trek deze vervolgens uit de blauwe dop.
Let op: de vloeistof moet in het buisje blijven!
10. Steek het kammetje van de groene dop in de ontlasting.
Let op: alle inkepingen van het kammetje moeten gevuld zijn. Indien dit niet direct het geval is, steek het kammetje dan nogmaals in de ontlasting, totdat alle kammetjes gevuld zijn.

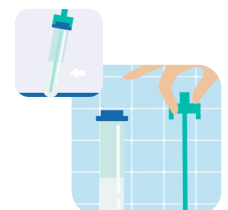

Vervolg Histaminebuis

11. Steek het kammetje door de opening van de blauwe dop. Druk de groene dop door, totdat deze niet meer verder kan. Het gevulde kammetje moet in de vloeistof zitten.
12. Draai de groene dop een kwartslag rechtsom, totdat de groene dop vastklemt in de blauwe dop. Het buisje is nu correct afgesloten.
13. Stop de histaminebuis in de andere RigidSafetyBag®.
14. Verwijder de witte folie van de RigidSafetyBag®. Druk de vrijgekomen plakstrip aan zodat het zakje goed is afgesloten.

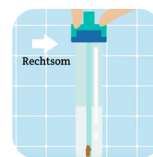

Overige handelingen DAG 3

15. Noteer de afnamedatums van alle drie de afnamedagen op het aanvraagformulier en ga akkoord met de voorwaarden.
16. Doe de SafetyBags samen met het aanvraagformulier in de retourenvelop en plak deze dicht. De verzendenvelop is nu gereed voor verzending naar ons laboratorium.



Verzenden:

- Binnen Nederland moet de verzending op **maandag t/m donderdag** (bij postbuslichting of PostNL-punt) plaatsvinden.
- Vanuit België versturen vanaf maandag t/m woensdag via UPS.

NB: Verstuur niet in het weekeinde of voor feestdagen!



Versturen naar:

NL: RP Analytic • Antwoordnummer 1461 • 4460 VS Kamperland

België: RP Analytic • Afgeven bij een UPS-accesspoint